

HealthyLungs

ANDROID - MOBILE APPLICATION
USER MANUAL FOR DOCTORS

Зміст


Як встановити додаток HealthyLungs.....	3
Реєстрація, Логін.....	4
Перегляд пацієнтів	5
Перегляд показників пацієнта	6
Навігаційна панель лікаря. Налаштування.....	7
Вибір Лікарні.....	7
(Для менеджера) Перегляд нерозподілених пацієнтів, Перегляд активності лікарів	8
Посилання	9

Як встановити додаток HealthyLungs


Для того, щоб почати роботу з сервісом потрібно скачати мобільний додаток HealthyLungsDoctor у PlayMarket чи за отриманим посиланням на додаток.

Реєстрація, Логін

Для входу в систему потрібно пройти авторизацію користувача. Незареєстрованим користувачам потрібно пройти реєстрацію.

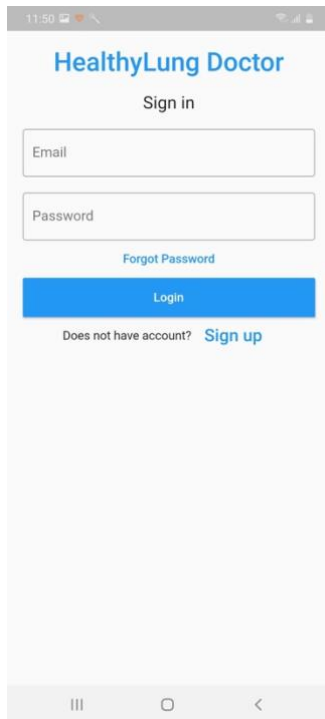

Після реєстрації введіть ваші Email та пароль для входу в систему

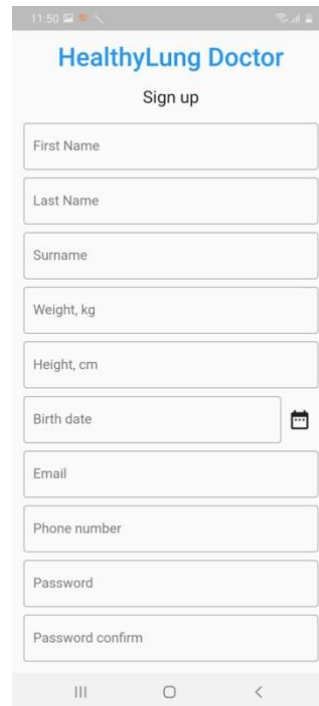


Заповніть усі реєстраційні поля та натисніть кнопку реєстрація


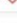
Примітка. Ваші екрани можуть дещо відрізнятися від прикладів у цьому документі, але основні елементи однакові.



Примітка. email та пароль чутливі до регістру. Caps Lock вимкнено за замовчуванням. Якщо ви забули свій email чи пароль, на екрані **Sign in** натисніть на **forgot password** посилання.

Перегляд пацієнтів

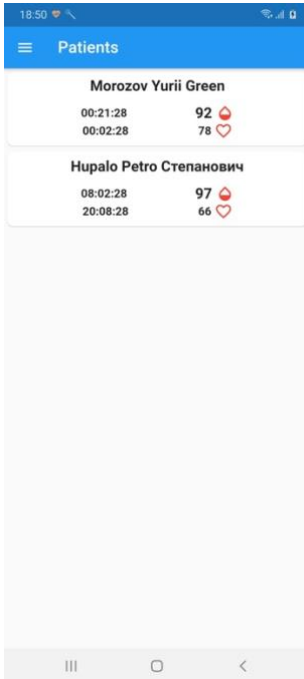Після авторизації відобразиться список закріплених пацієнтів. Даний список формується менеджером лікарні до якої ви відноситесь.



Morozov Yuri Green	
00:21:28	92 
00:02:28	78 


Hupalo Petro Степанович	
08:02:28	97 
20:08:28	66 

У вкладці "**Patients**" ви можете переглядати список пацієнтів та їхні останні показники

Примітка. Подана вище вкладка буде повністю відображена після того як менеджер лікарні прикріпить до вас пацієнтів.

Перегляд показників пацієнта


Вибравши одного з пацієнтів, ви перейдете у вкладку «**List indicator for patient**», де можете переглянути історію його вимірювань.

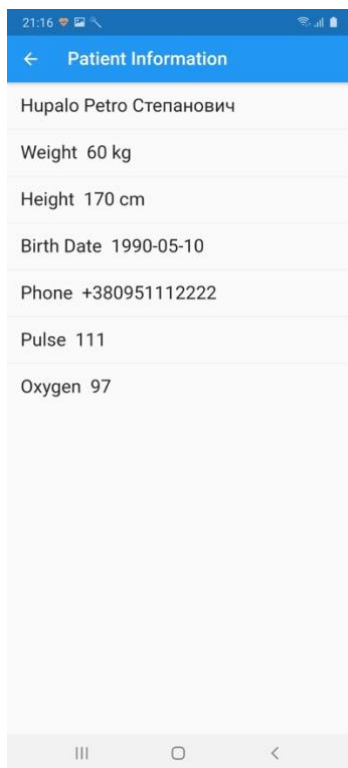

У вкладці «**Patient information**» містяться дані про пацієнта, в тому числі його контактна інформація.




Натиснувши на кнопку «**Graph**», відобразиться графік показників пацієнта за деякий попередній період часу.

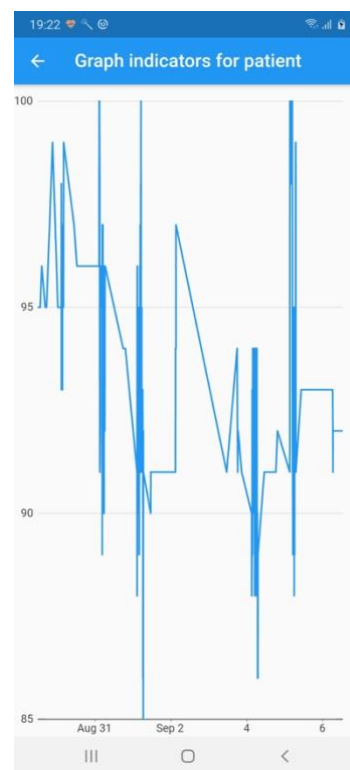


Навігаційна панель лікаря. Налаштування.

Вибір Лікарні


Переходити по додатку ви можете за допомогою панелі вкладок, яка з'являється у лівій частині екрану програми.

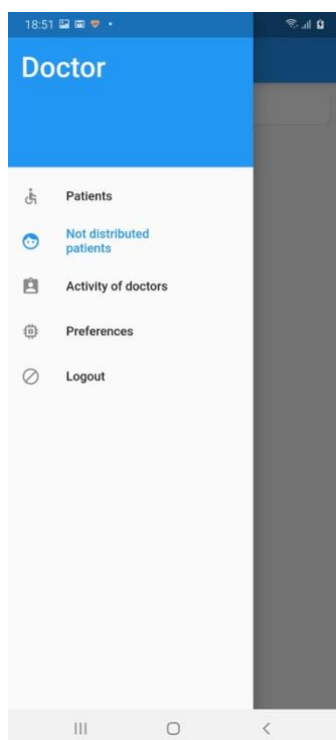

З навігаційної панелі ви можете перейти до списку пацієнтів, налаштувань та вийти з системи.

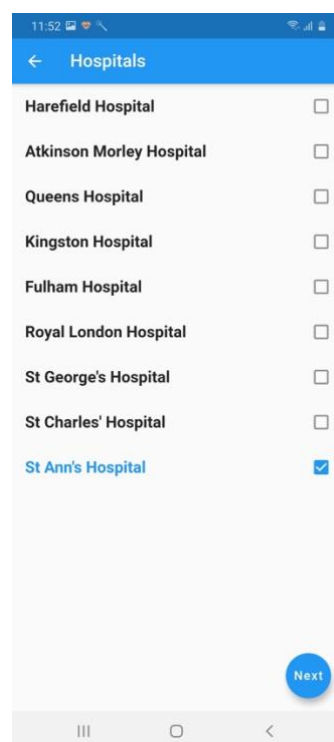


У вкладці "**Hospitals**" для того, щоб бачити пацієнтів, які прив'язані до вас, виберіть з списку лікарні у яких ви працюєте.

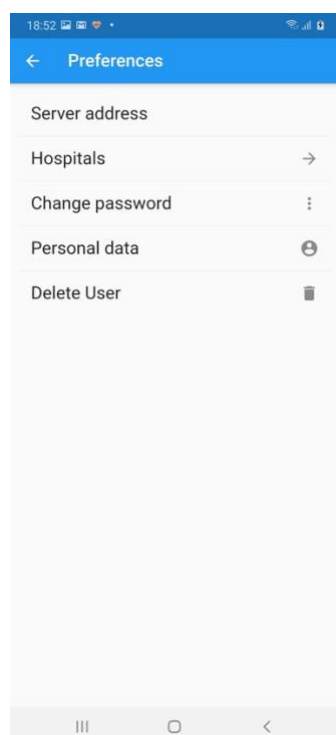


У вкладці "**Preferences**" ви можете вибрати лікарні у яких працюєте, змінити свій пароль, переглянути та відредагувати персональні дані і видалити свій профіль з системи.

(Для менеджера) Перегляд нерозподілених пацієнтів, Перегляд активності лікарів

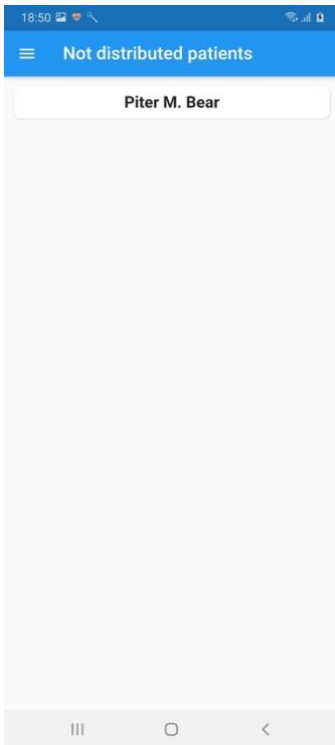

З навігаційної панелі ви можете перейти до списку нерозподілених пацієнтів у вкладку **"Not distributed patients"**

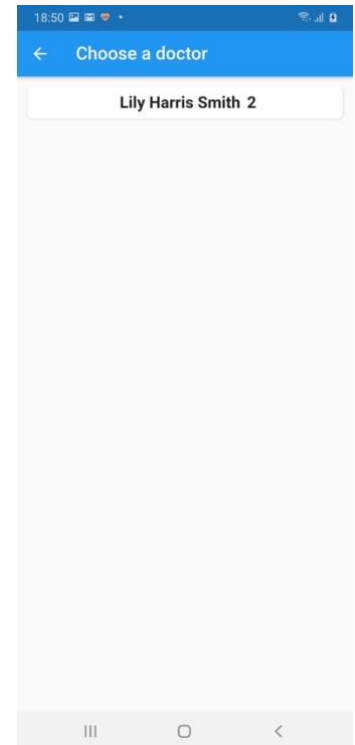

Вибравши нерозподіленого пацієнта, оберіть йому лікаря серед доступних



Переглядайте усю активність лікарів з вкладки **"Last doctor activities"**

Посилання

https://buy.garmin.com/en-US/US/c10002-p1.html?FILTER_FEATURE_PULSEOX=true&sorter=price-asc

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garmin.android.apps.connectmobile&hl=uk>

<https://apps.apple.com/us/app/garmin-connect/id583446403>