HealthyLungs

ANDROID - MOBILE APPLICATION USER MANUAL FOR PATIENTS

Зміст

Як встановити додаток HealthyLungs	3
Реєстрація, Логін	4
Як скачати додаток Garmin Connect	5
Синхронізація у Garmin Connect	6
Список підтримуваних пристроїв з можливістю моніторингу SpO2	7
Посилання	8

Як встановити додаток HealthyLungs

Для того, щоб почати роботу з сервісом потрібно скачати мобільний додаток HealthyLungsPatient у PlayMarket чи за отриманим посиланням на додаток.

Реєстрація, Логін

Для входу в систему потрібно пройти авторизацію користувача. Незареєстрованим користувачам потрібно пройти реєстрацію.

11:50 🖬 🛡 🔨	🗢 at 🚊	11:50 🖬 🛡 🔨	7
HealthyLung Docto	or	HealthyLung	Doctor
Sign in		Sign up	
Email		First Name	
Password		Last Name	
Forgot Password		Surname	
Login		Weight, kg	
Does not nave account? Sign up		Height, cm	
		Birth date	
		Email	
		Phone number	
		Password	
		Password confirm	
		III O	<

Після реєстрації введіть ваші Email та пароль для входу в систему

Заповніть усі реєстраційні поля та натисніть кнопку реєстрація

Примітка. Ваші екрани можуть дещо відрізнятися від прикладів у цьому документі, але основні елементи однакові.

Примітка. email та пароль чутливі до регістру. Caps Lock вимкнено за замовчуванням. Якщо ви забули свій email чи пароль, на екрані **Sign in** натисніть на **forgot password** посилання.

Як скачати додаток Garmin Connect

Для того, щоб почати роботу з сервісом потрібно скачати мобільний додаток Garmin Connect у PlayMarket чи AppStore.



Після цього пройти покрокове підключення вашого смарт годинника чи браслета до даного додатку.



8:38				
≡ Devices				
Index Smart Scale				
fenix 6 Pro Not Connected	0			
REGISTERED TO GARMIN CONNECT				
vivomove				
Forerunner 630				
vivoactive HR				
Index Smart Scale (2)				
vivofit 3				
vivofit				
vivosmart				
Forerunner 245 Music				



Синхронізація у Garmin Connect



Для експорту показників у пацієнтів на смартфонах повинен бути встановлений додаток Garmin Connect



Синхронізація з пристроями Garmin відбувається автоматично при вході в додаток Garmin Connect або при натисканні кнопки синхронізації у правому верхньому куті екрану

Список підтримуваних пристроїв з можливістю моніторингу SpO2

Garmin:

- vívosmart 4
- vivomove 3/3s/4/4s
- vívoactive 4
- forerunner 245/945/
- venu
- fenix 6/6s/6x
- quatix 6/6X
- tactix Delta

Посилання

https://buy.garmin.com/en-US/US/c10002p1.html?FILTER_FEATURE_PULSEOX=true&sorter=price-asc

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garmin.android .apps.connectmobile&hl=uk

https://apps.apple.com/us/app/garmin-connect/id583446403